



## • Informacje dotyczące doboru produktów

- **WYMIAR "b"** to obwód w największym miejscu tuż nad kostką.
- **WYMIAR "d"** to obwód na wysokości głowy kości strzałkowej. Jest to największy obwód kończyny poniżej stawu kolanowego.
- **WYMIAR "f"** to obwód uda w połowie jego długości.
- **WYMIAR "g"** to obwód uda mierzony 5 cm poniżej pachwiny.

Jeżeli zalecamy choremu rajstopy, to mierzymy jeszcze obwód bioder i pasa. Chorej ciężarnej nie wykonujemy pomiaru bioder i pasa, ponieważ rajstopy dla kobiet w ciąży mają regulowaną górną część w zależności od czasu trwania ciąży. Według naszych doświadczeń rajstopy ciążowe można przepisywać chorym o nietypowej sylwetce, u których przy szczupłych kończynach i znacznie poszerzonym obwodzie brzucha, dobór odpowiednich rajstop jest niemożliwy bez utraty odpowiedniej siły ucisku na chore kończyny. Po prawej stronie schematu kończyny umieszczonego na tej stronie, należy wpisywać wymiar wysokości. Wypisane są one dużymi literami symbolizującymi odcinki AD, AF, AG. Podajemy tylko jeden wymiar w zależności od typu wyrobu (ostatni obwodowy).

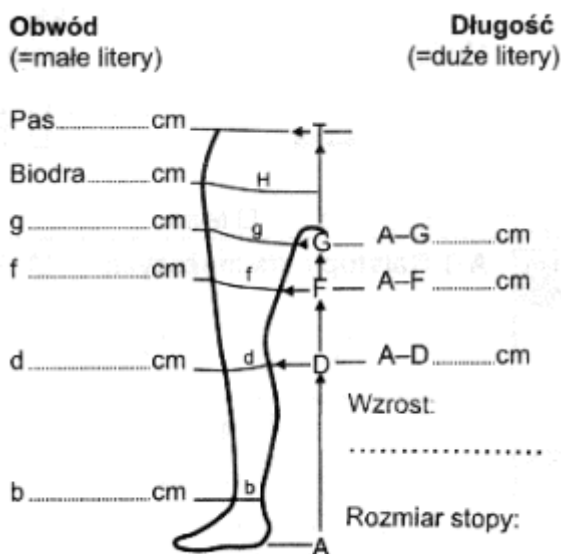

- **WYMIAR AD** - jest określeniem długości podkolanówki. Mierzy się go w pozycji stojącej bosą stopą na posadzce, po wewnętrznej stronie podudzia, od podłoża do linii "d". (patrz schemat)
- **WYMIAR AF** - to długość pończochy krótkiej mierzona od podłoża do wysokości połowy uda, linii "f". (patrz schemat)
- **WYMIAR AG** - jest długością określaną zarówno dla pończoch jak i dla rajstop. Mierzmy go od podłoża aż do linii "g". (patrz schemat)

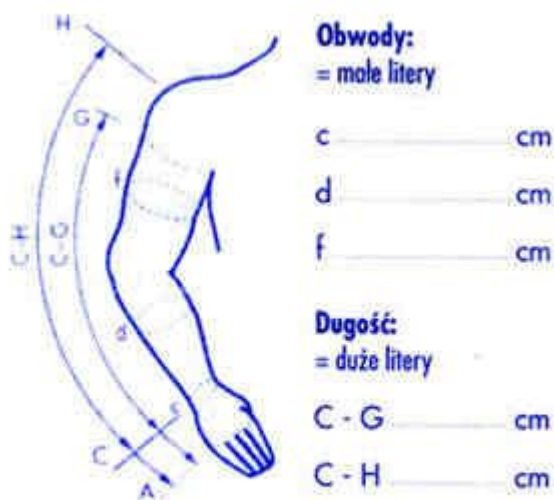

## • SIGVARIS - rękaw na specjalne zamówienie

Pomiary winny być robione rano na ramionach wolnych od opuchlizny. Nie możemy odpowiadać za nieprawidłowo pobrane pomiary. Pomiar długości winien być zrobiony po zewn. stronie kończyny

**obwody w cm (małe litery)**

**długość w cm (duże litery)**